

Optiben

IRRITACIÓN OCULAR

► **Uso previsto:**

Para humectar y lubricar los ojos.

Para aliviar la sensación de ojo seco e irritaciones menores causadas por condiciones ambientales, ojos cansados, uso extendido de pantallas de vídeo o uso de lentes de contacto.

Compatible con el uso de lentes de contacto.

Este producto no es una solución humectante o acondicionadora para lentes de contacto.

► **Modo de empleo:**

Lave y seque sus manos antes del uso.

Compruebe que la botella esté intacta para asegurarse de su esterilidad.

Vierta dos gotas en cada ojo.

► **Almacenamiento:**

Conservar a temperatura inferior a 25°C. 

Usar entre los 90 días después de abrir el bote.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

► **Precauciones:**

No usar si la botella está dañada.

No tocar el ojo con la botella; esto es para evitar lastimaduras o infecciones oculares.


No tocar el gotero.

Si las condiciones empeoran, consulte a un especialista.

► **Presentación del producto:**

Bote con 15 ml de solución isotónica estéril con extractos herbales: Euphrasia officinalis, Camomila, HPMC 0,3%, EDTA 0,05%, PHMB 0,0001% (agente conservante).

► **Distribuido por:** Laboratorios Cinfa S.A. Carretera Olaz-Chipi, 10 Polígono Industrial Areta, 31620 Huarte (Navarra) - España

 Lapis Lazuli International NV
Bolderweg 2,
1332 AT Almere, The Netherlands

REF1291/02 792



PRO21400/0718

