



Optiben

OJOS SECOS

► Aplicaciones:

Para humectar y lubricar el ojo. Para aliviar las sensaciones de sequedad y las irritaciones benignas ocasionadas por las agresiones del entorno, el cansancio, el trabajo prolongado frente a pantallas de video o el uso de lentes de contacto. Apta para el uso con lentes de contacto.

► Características y modo de acción:

Optiben ojos secos contiene hialuronato sódico, un polímero natural que también está presente en las estructuras del ojo humano. Las características físicas especiales del hialuronato sódico confieren a Optiben ojos secos sus propiedades "viscoelásticas" y de retención de agua. Optiben ojos secos proporciona un recubrimiento estable sobre la superficie del ojo, que tan sólo es eliminado lentamente al parpadear. Por ésto, Optiben ojos secos combina un alivio de larga duración con un máximo bienestar. Optiben ojos secos posee una tolerancia excelente debido a su composición única.

La composición particular de los conservantes de Optiben ojos secos garantiza la esterilidad de la solución en el frasco multidosis abierto por un período de tres meses.

► Modo de empleo:

- Lavarse y secarse bien las manos antes de usar.
 - No toque el gotero.
 - Compruebe que el frasco está intacto para estar seguro de su esterilidad.
 - Para abrir el frasco, gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj para romper el cierre de seguridad.
 - Ponga el frasco boca abajo y vierta dos gotas en cada ojo cuidando no tocar el ojo con el frasco.
- Para adultos y niños.

► Conservación:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar antes de 3 meses después de abrir el frasco.

No sobrepasar la fecha límite de caducidad que aparece en el envase exterior.

► Precauciones de empleo:

No tocar el ojo con el frasco para evitar cualquier arañazo o infección del ojo.

En caso de aparición de problemas tras la utilización, consulte a su médico.

► Composición por ml:

2 mg de hialuronato sódico, 0,0015 mg de polihexanida (PHMB), 0,1 mg de edetado sódico (EDTA), Tampón fosfato isotónico, Agua purificada.



Lapis Lazuli International N.V. Bolderweg 2, NL-1332 AT Almere, The Netherlands

► Distribuido por:

Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10 P.I. Areta
31620 Huarte (Navarra)
ESPAÑA

