

Optiben

OJOS SECOS

REPAIR

Alivio de la sequedad ocular con acción reparadora y protectora

► Solución estéril de uso oftalmológico y pH fisiológico, con hialuronato de sodio y aguas destiladas de ginkgo biloba, arándanos, hinojo y centella en prácticas ampollas monodosis de 0,5 ml, sin conservantes.

El hialuronato confiere al producto propiedades mucomiméticas y viscoelásticas, que aseguran una lubricación adecuada de la superficie ocular, protegiéndola de la fricción causada por los movimientos del ojo. Este polímero es también capaz de retener agua e interactuar al mismo tiempo con el epitelio ocular. Por esta razón, la solución mantiene húmeda la superficie ocular y aumenta la estabilidad de la película lagrimal precorneal que protege la superficie de los agentes medioambientales.

En la formulación del producto, el agua destilada de ginkgo biloba mejora la agudeza visual a larga distancia, alivia la fatiga y el enrojecimiento del ojo y de la membrana mucosa ocular. El agua destilada de ginkgo biloba se usa junto con el agua destilada de centella, debido a su acción coadyuvante en la reducción de los procesos irritativos.

En el contexto de la formulación del producto, el agua destilada de arándanos se usa por sus propiedades refrescantes: produce alivio de la fatiga ocular y actúa como protector de la mucosa ocular contra los agentes atmosféricos y los factores medioambientales.

El agua destilada de hinojo es usada comúnmente en enfermedades oculares para aliviar la sensación de quemazón, y junto al agua destilada de arándanos, se usa por su acción reparadora. Los componentes vegetales usados en la formulación en forma de aguas destiladas, ejercen una acción de alivio, refrescante y protectora.

La fórmula contiene también cloruro de sodio y dos agentes tampón (ácido bórico y tetraborato de sodio decahidratado) para garantizar una solución fisiológica.

Por tanto, las Gotas Optiben ojos secos Repair poseen una acción humectante y lubricante sobre la superficie ocular, y producen un alivio temporal de la sensación de quemazón, la irritación y las molestias debidas a la sequedad del ojo. Las gotas oculares pueden usarse como protección contra la irritación.

Las Gotas Optiben ojos secos Repair son apropiadas para usuarios de lentes de contacto sin necesidad de quitárselas.

► Indicaciones

Gotas de acción reparadora y protectora, indicadas para refrescar, aliviar y lubricar los ojos con sequedad o en casos de irritación del ojo o de la mucosa ocular debidos a:

- factores medioambientales (aire acondicionado, exposición excesiva a la radiación solar, el viento, el humo o la contaminación).
- sequedad del ojo debida a fatiga excesiva causada por el trabajo prolongado ante el ordenador, la lectura intensiva o el síndrome del ojo seco.
- estrés oftálmico subsecuente a la cirugía de la superficie ocular.
- uso de lentes de contacto durante muchas horas al día.

► Instrucciones de uso

Adecuadas para su uso con lentes de contacto. Lávese correctamente las manos. Abra el sobre de aluminio. Retire de la tira una ampolla monodosís. Gire la parte superior para abrirla. Deposite 1-2 gotas en cada ojo presionando suavemente la ampolla monodosís. Una vez abierta, cierre la ampolla monodosís: su contenido deberá usarse en las siguientes 12 horas.

Las gotas están indicadas también para su uso frecuente varias veces al día, según sus necesidades o por indicación de su médico.



► Composición

Hialuronato de sodio, agua destilada de ginkgo biloba, agua destilada de arándano, agua destilada de hinojo, agua destilada de centella asiática, ácido bórico, tetraborato sódico, cloruro sódico y agua para preparaciones inyectables.
Sin conservantes.

► Advertencias y precauciones

- El producto está destinado al uso exclusivamente oftalmológico.
- El producto está destinado a su uso por un solo paciente por ampolla.
- No utilice el producto si el sobre de aluminio o envase están dañados o no están perfectamente cerrados cuando los abre por primera vez.
- Al aplicarlo, no toque el párpado ni la superficie del ojo con la punta del envase.
- No usar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.
- En caso de producirse efectos indeseados durante el uso, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

► Efectos secundarios

Hasta la fecha no se ha informado de ningún efecto secundario del producto.

► Embalaje

20 Monodosís de 0,5 ml con autocierre.

► Condiciones de almacenamiento

No almacenar por encima de los 30°C.

Una vez abierto, cerrar el envase monodosís: su contenido deberá usarse en las siguientes 12 horas. Almacenar el resto de monodosís dentro del sobre de aluminio.

► Caducidad

Para producto sin abrir: 36 meses desde la fecha de producción.

No exceder la fecha de caducidad mencionada en la caja y en la ampolla monodosís.



COC Farmaceutici s.r.l. - Via Modena, 15-40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo), Italia.

► Distribuido por:

Laboratorios Cinfa, S.A.

Carretera Olaz-Chipi, 10. Polígono Industrial Areta
31620 Huarte (Navarra) - España

► Fecha de la última revisión: 01.01 de 07/2018



0373

PRODUCTO SANITARIO

