

# Optiben

## IRRITACIÓN OCULAR

**Solución oftálmica para lubricar y humectar la superficie ocular y aliviar la sensación de ojo seco e irritaciones.**

► **Uso previsto:**

Alivia la sensación de sequedad e irritación ocular leve, causada por las condiciones ambientales (aire acondicionado / calefacción, contaminación, exposición prolongada a la luz solar, piscinas, agua salada, polvo, viento, tabaco), la fatiga, el uso prolongado de dispositivos digitales o el uso de lentes de contacto.

Contiene Hipromelosa (HPMC), agente viscosizante y humectante que lubrica el ojo y las lentes de contacto, mejora las molestias oculares como escozor o sensación de cuerpo extraño.

Apto para ser usado con lentes de contacto.

La **camomila** y la **eufrasia**, que contienen alta concentración en bioflavonoides, han sido empleadas tradicionalmente en preparados oculares.

► **Modo de empleo:**

Lave y seque sus manos antes del uso.

Compruebe que el frasco esté intacto para asegurarse de su esterilidad.

Vierta dos gotas en cada ojo.

No tocar el ojo con el frasco.

Uso con lentes de contacto: Instilar una o dos gotas antes de la inserción, durante el porte o antes de retirar las lentes.

Conservar a temperatura ambiente.

Después de la apertura del frasco, no debe utilizarse pasados 3 meses.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

► **Precauciones:**

No usar si el frasco está dañado.

No rozar el ojo con el frasco para evitar erosiones o infecciones oculares.

No tocar el gotero para evitar la contaminación.

En caso de reacción adversa, consultar con un especialista.

No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes.

► **Composición:**

Solución isotónica estéril con Euphrasia Officinalis, Camomila, Methocel E4M premium (HPMC) 0,3%, Edetato disódico 0,05%, PHMB 0,0001% (agente conservante).

Fecha de la última revisión: 2019/06



Avizor, S.A.  
C/ La Cañada, 17  
28850 Torrejón de Ardoz  
ESPAÑA

► **Distribuido por:**

Laboratorios Cifna, S.A.  
Olaz-Chipi, 10 P.I. Areta  
31620 Huarte (Navarra)  
ESPAÑA

PROS1006



0318

